

Bruksanvisning

Tum-E-Vac[®]

Tum-E-Vac magskölningsset består av följande delar:

- 1 st 5 liters påse (med röd text)
- 1 st 3,5 liters påse (med blå text)
- 1 st förbindelseslang med Y-koppling
- 1 st magsond med röntgentråd
- 2 st koltuber (ingår i artikel 2057, ej 2054)
- 1 st bitblock
- 1 st aspirationsspruta
- Upphängningsanordning

Ha en droppställning till hands

1. Tag den stora påsen och lägg den på golvet, tillse att locket är stängt.
 2. Tag den mindre påsen, stäng klämman, håll i vatten och häng upp den på droppställningen.
 3. Klipp Y-kopplingen enligt anvisningen för 28 F & 32 F.
 4. Sätt bitblocket i munnen på patienten och för igenom magsonden
 5. Anslut magsonden till y-kopplingen, och Du är klar att skölja
- A. Öppna den övre slangklämman, vattnet rinner då ner i patienten.
B. Stäng den övre klämman och öppna den nedre. Tillse att patienten tömmer ut all vätska.

OBS: *Om Du behöver fylla på mer vätska i den övre påsen så måste den undre påsen tömmas först.*

När sköljningen är slutförd, stäng den stora slangklämman samt tillsätt kolet* genom att skära av tippens på tuben och skruva i tuben (tag av den röda korken som sitter på Y-kopplingen och skruva i tuben där) Kolla så att båda slangklämmorna är stängda.

* **OBS:** *Kol i löst form har en tendens att skikta sig och kolet kan då bilda klumpar. Vårt kol har en beredning som skall motverka klumpbildning, men trots detta kan det bildas klumpar om tuberna legat stilla en längre tid. Det räcker då inte att skaka tuben, utan man måste mekaniskt bearbeta klumparna tills dessa har lösts upp. Detta gör Ni lämpligast genom att klämma med fingrarna på tuben tills klumparna är borta. Skaka därefter tuben för att fördela kolet jämnt i vätskan. Om det blir stopp i slangen kan detta ibland avhjälpas genom att man aspirerar/sprutar med vatten med hjälp av sprutan som finns i paketet.*

COLIBRI MEDICAL AB

Box 57, 250 54 HELSINGBORG, tel 042-16 13 45, fax 042-16 13 46